

GARANTIE

De firma AFP Medical waarborgt het apparaat gedurende 2 jaar. Deze waarborgperiode vangt aan op de aankoopdatum.

De firma AFP Medical vervangt binnen de garantietermijn gratis defecte onderdelen en vergoedt het arbeidsloon voor herstelling. De garantietermijn wordt daardoor niet verlengd.

Deze garantie sluit verdergaande garantieklachten, in het bijzonder op loopvernietiging, vermindering of schadevergoeding uit.

Deze garantie vervalt indien de schade te wijten is aan een verkeerd gebruik, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing vermelde instructies of inbegrepen door derden. Batterijen en aan slijtage onderhevige onderdelen vallen niet onder de garantie.

Gelieve in geval van garantie-aanspraken of herstellingen het gehele apparaat met deze afgestempeld garantiebewijs en aankoopdatum naar onze naverkoop dienst te sturen.

Toestel nr.	
Type	
Aankoopdatum	
Stempel wederverkoper	



TECHNISCHE KENMERKEN

Type	AL2
Stroomvoeding	230V ~ 50Hz
Verbruik	150VA
Bescherming	Class II, Type BF
Geluid	50dB

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Luchtdebiet	6.5 L/min @ 100kPa
Overeenkomstig aan de toegevoegde V van de richtlijn 93/42/EEC	
Overeenkomstig aan EN 60601-1	
Overeenkomstig aan EN 60601-1-2	

SYMBOOL



Aandacht , lees de documenten



Wisselstroom



Class II



Type BF



Aansteken



Uitdoen

GEBRUIKSAANWIJZING



aiglon^{GREEN}
Verstuiversysteem



We danken u voor de keuze van de Aiglon Green. Het is een pneumatisch apparaat voor aërosoltherapie aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen. De green is stevig. Zijn conceptie is eenvoudig. Het toestel is gemakkelijk af te spoelen. De Aiglon Green werkt vlug en verstuift een nevel van partikels waarvan de diameter aan de vereiste normen in pneumologie beantwoordt. (Dit op voorwaarde dat u toebehoren van goede kwaliteit gebruikt)

Welk ook het voorgeschreven geneesmiddel is, is het hoofzakelijk de raad en de aanbevelingen van de geneesheer die u dient op te volgen en hij is ook de persoon die u zult raadplegen in geval van twijfel.

De Aiglon Green wordt geleverd met een set "aquineb" die bestaat uit een masker voor volwassenen, een darm van 2m lengte en een verstuiver.

Het is in uw voordeel de beschreven raadgevingen zo nauwkeurig mogelijk op te volgen, zo zult u nog beter de gunstige gevolgen van uw behandeling weten te waarderen.



afp medical
somers road
rugby
cv22 7dg
united kingdom
www.afpmedical.com

GEBRUIKSAANWIJZING

De stekker in het stopkontakt (230V) steken.

De verstuiver afschroeven om de geneesmiddelen in te voeren.

Een einde van de luchtdarm op de luchtafvoerpijp van het toestel aansluiten en het andere aan de basis van de verstuiver. Het masker of mondsuk wordt aangesloten op de luchtafvoerkoker van de verstuiver

Het masker tegen het gezicht plaatsen

De compressor aansteken. U zult onmiddellijk opmerken dat de nevel die u moet inhaleren uit de verstuiver wordt vrijgemaakt.

Adem steeds door de mond. De inademing dient langzaam en diep te zijn.

Het is ideaal een pauze in te lassen op het ogenblik dat uw longen gevuld zijn, juist voor de uitademing.

Deze pauze van één tot twee seconden begunstigt de afzetting van het geneesmiddel in de luchtpijptakken en de longblaasjes.

De uitademing gebeurt met een normale snelheid.

Wanneer de verstuiver bijna leeg is begint deze lichtjes te spuwen. U kunt nog doorgaan met de behandeling tijdens enkele minuten om het bakje goed leeg te maken en het onvermijdelijke residuele volume te verminderen maar dit is niet onmisbaar.

ONDERHOUD

De FILTER dient na drie of zes maanden vervangen te worden. Dat hangt af van het aantal behandelingen, de kwaliteit van de kamerlucht enz...

De filter vervangen wanneer deze zeer ontkleurd is en vooral zodra de behandelingsduur langer wordt in vergelijking met het begin.

De TOEBEHOREN onmiddellijk na het gebruik goed afspoelen met water. Op die manier voorkomt u mogelijke kristalvorming tijdens het drogen. Toebehoren "Aquineb" geleverd met de Aiglon Green zijn niet duur. Er is dus geen reden om ze langer te gebruiken dan *hun normale levensduur van 150 gebruiken maximum*. De verstuiver is verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van de vrijgemaakte nevel.



WERKINGSPROBLEMEN

De connectie moet goed nagekeken worden indien de aiglon green niet goed werkt.

Indien de aiglon green werkt maar te traag is, kijk de filter achteraan het toestel na en vervang deze indien nodig.

Kijk daarna de verstuiver na en vervang het indien deze geen mooi wolk vormt.

VOORZORGEN

- De ventilator op de zijkant van het toestel vrij houden.
- Zich houden aan het aantal verstuiwing voorgeschreven door uw arts.
- Indien de behandeling weinig of geen effecten geeft, raadpleeg uw arts.
- Uw aquineb set mag niet meer dan 10ml vloeistof bevatten. 1ml is nodig.

